



Bedienungsanleitung (Kurzfassung)

BEDFONT Smokerlyzer Lunglife (Spirometer)

Vorbemerkungen: Das Gerät dient der Ermittlung des Lungenalters und so der Einstiegsmotivation des Rauchers, um das Rauchen aufzugeben

1. Einschalten:

Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Ein- / Ausschalters an.

2. Einstellung der Patientenparameter:

Alle Einstellungen werden über die Auswahltasten

▼▲ vorgenommen und mit der Eingabetaste ←

bestätigt.



Patientenalter

Patientengröße

Geschlecht (♂ männlich; ♀ weiblich)

Ethnische Zugehörigkeit

1 Europäisch

2 Asiatisch


3 Afrikanisch

4 Chinesisch

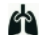
5 Japanisch

3. Durchführung des Tests:

Setzen Sie ein neues Mundstück auf den Lunglife auf.

Sobald das Gerät meßbereit ist und der Patient mit dem Ausatmen beginnen kann, sehen Sie  im Display. Der Patient muß nun im Sitzen so schnell und so viel wie möglich durch das Gerät atmen.

4. Ergebnisse

Nach dem Test können Sie durch Drücken der Eingabetaste zwischen den Ergebnissen hin- und herschalten. Durch Drücken der Auswahltaste nach oben ▲ wird Ihnen das Lungenalter  angezeigt.

5. Hinweis:

Erscheint während des Tests ein „!“, war die ausgeatmete Luftmenge nicht ausreichend oder die Ausatmung zu langsam. Wiederholen Sie den Test in diesem Fall.

6. Ausschalten:

Drücken Sie zum Ausschalten des Lunglife den Ein- / Ausschalter und halten Sie diesen gedrückt bis der Lunglife abschaltet.



BEI RÜCKFRAGEN / PROBLEMEN:

Specialmed GmbH

Tel.: +49 8731 / 3264130

Fax: +49 8731 / 3264930

E-Mail: info@specialmed.de

Page : www.specialmed.de