



Bedienungsanleitung: Hydrolyzer (Kurzform)

1. Inbetriebnahme

- Schalten Sie den EC60 am Schalter (**F**) ein
- Justieren Sie die LCD-Anzeige an der Schraube (**E**) auf Null

2. Messung

- Setzen Sie das T-Stück in den Sensor-Kopf (Siehe Abbildung).
- Setzen Sie ein Pappmundstück auf das T-Stück auf.
- Lassen Sie den Patienten in das Mundstück ausatmen und notieren Sie den höchsten angezeigten Wert
- Entnehmen Sie zwischen den Messungen immer das T-Stück aus dem Sensor-Kopf

3. Ausschalten

- Wenn Sie die Tests beendet haben, schalten Sie das Gerät am Schalter (**F**) aus und entnehmen Sie das T-Stück zum Trocknen aus dem Sensor-Kopf

4. Reinigung

- Reinigen Sie den Hydrolyzer ausschließlich mit einem feuchtem Tuch. Reinigungsmittel oder Alkohole würden den Sensor irreversibel schädigen

5. Drucker

- Der Drucker wird an den Anschlüssen (**A & B**) angeschlossen. Die Einstellung des Druckers erfolgt an der Stellschraube (**C**).

6. Kalibrierung

- Die Kalibrierung erfolgt über die Stellschraube (**D**). Lesen Sie hierzu bitte die Kalibrieranleitung.

Bitte denken Sie daran, das Gerät alle sechs Wochen zu kalibrieren und das Datum zu notieren !

Nur so sind exakte Messergebnisse garantiert.

Für Rückfragen / Probleme und Bestellungen:

Specialmed® GmbH
 Roßberg 2, D-84164 Lengenthal
 Tel.: +49 8731 3264130, Fax: +49 8731 3264930
 Mail: info@specialmed.de, Page: www.specialmed.de