

Smokerlyzer / Rauchometer

piCO⁺

Kurzbedienungsanleitung


1. Schalten Sie das Atemtestgerät ein, indem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Bringen Sie das D-Stück für die Atemprobe sowie ein neues Mundstück an.



3. Atmen Sie ein und drücken Sie die Taste zweimal, um den Atemtest zu starten.

4. Halten Sie 15 Sekunden die Luft an. Wenn Sie die Luft nicht 15 Sekunden lang anhalten können, siehe Seite 8.

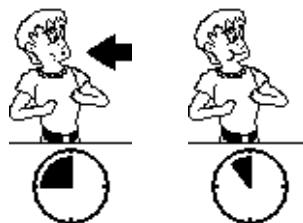


5. Während der letzten drei Sekunden des Countdowns ertönt der Signalton.

6. Blasen Sie langsam in das Mundstück und versuchen Sie dabei, Ihre Lungen vollständig zu leeren.



7. Der ppm-Wert und der äquivalente Prozentsatz des CO-Hämoglobins (COHb) steigen nun an und werden bei Erreichen des Messwertes dann gehalten. Die farbigen LEDs leuchten entsprechend auf. Sehen Sie hierzu die Tabelle auf Seite 9 für die Auswertung der Messwerte.

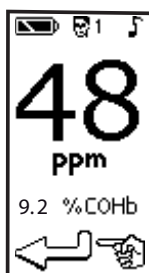

8. Entfernen Sie das D-Stück zwischen den Tests, um den Sensor mit Frischluft zu belüften.

9. Um den Atemtest zu wiederholen, drücken Sie die Taste erneut zweimal, um zur Hauptanzeige zurückzukehren, und fahren Sie ab Schritt 2 fort.

10. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus, wenn keine Eingabe erfolgt.

