



Techniken zur Durchführung der Wasserstoff (H₂) Atemtests

Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um korrekte Messergebnisse zu erhalten:

- Die Technik der Probenentnahme muß während des Tests pro Patient immer die Gleiche bleiben (nicht den Patienten einmal mit der Maske und einmal mit dem Mundstück testen, oder einmal die Luft 10 sek. anhalten lassen und beim nächsten Test 15 Sekunden). Weiterhin ist darauf zu achten, dass sich der Patient zur Abgabe der Atemprobe immer in der gleichen Körperposition befindet (sitzend, liegend oder stehend).
- Bei den Altgeräten (alle Geräte außer Gastro+) ist darauf zu achten, dass der Wert auf dem Display vor Beginn eines neuen Tests < 5 ppm ist.
- Schalten Sie das Gerät nach der letzten Messung des Tages immer aus.
- Beachten Sie, dass der Batteriewechsel immer nur bei ausgeschalteten Geräten erfolgen darf !
- Lagern und betreiben Sie das Gerät in möglichst großer Entfernung zu Plätzen, an denen Desinfektionsmittel gelagert werden oder zum Einsatz kommen
- Achten Sie darauf, dass der Sensor keinesfalls feucht wird !
- Halten Sie die vorgeschriebenen Kalibrierintervalle ein (alle 6 Wochen für Altgeräte, alle 3 Monate für Gastro⁺).

Empfehlungen:

- Haben Sie immer Reservebatterien zur Hand
- Verwenden Sie immer den Kalibriernachweis und legen Sie diesen zum Gerät

BEI RÜCKFRAGEN / PROBLEMEN:

Specialmed GmbH
Tel.: +49 8731 / 3264130
Fax: +49 8731 / 3264930
E-Mail: info@specialmed.de
Page: www.specialmed.de