



Kalibrieranleitung für: Gastrolyzer Gastro I (Kurzanleitung)

1. Schalten Sie das Gerät ein. Die Anzeige beginnt von einem Wert rückwärts Richtung 0 oder NEG zu laufen (dies kann bis zu 2 Minuten dauern). Ist dieser Vorgang beendet, blinkt das Display.
2. Drücken Sie die rote „Zero“ Taste für 2 Sekunden – es erscheinen nun der Reihe nach folgende Anzeigen im Display: Set, Cal, Go
3. Drücken Sie die blaue „Go“ Taste. Das Gerät startet einen Countdown der von 15 beginnt und bei Null endet.
4. Schließen Sie das Prüfgas (200 ppm H₂ in Luft) an und lassen Sie dieses mit einer Geschwindigkeit von 0,5 l/min (unterster Strich am Kugelflowmeter) nach Ablauf des Countdowns ins Gerät einströmen (dazu muss ein T-Stück verwendet werden, da sonst die Kalibrierung nicht funktioniert).
5. Warten Sie nun bis der im Display angezeigte Wert stabil ist (Dauer ca. 90 Sekunden).
6. Drücken Sie jetzt zum Kalibrieren die blaue „Go“ Taste (das Display beginnt zu blinken).
7. Durch Drehen des Potentiometers im Uhrzeigersinn wird der angezeigte Wert niedriger, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn höher. Dieser befindet sich auf der rechten Unterseite des Gastrolyzers in einem kleinen Loch.
8. Stellen Sie diesen Wert auf 200 ein und drücken Sie danach zur Bestätigung erneut die blaue „Go“ Taste.
9. Schließen Sie den Kugelflowmeter und entnehmen Sie das T-Stück, damit das Gerät wieder richtig belüftet wird.
10. Schalten Sie das Gerät jetzt ab und warten Sie fünf Minuten bis das Prüfgas nicht mehr am Sensor anliegt.
12. Sie können das Gerät nun wieder einschalten und wie gewohnt messen.

Zu beachten:

- Sparen Sie Gas und schonen Sie Ihren Sensor. Bitte vermeiden Sie Gasmengen über 1 l/min.
- Die Prüfgasflasche steht unter Druck. Schützen Sie diesen vor Erwärmung über 50°C und direkter Sonneneinstrahlung. Versuchen Sie nicht die Flasche zu öffnen.
- Die Flasche ist ein Einwegbehälter. Sie kann nicht Wiederbefüllt werden

Bitte denken Sie daran:

Gerät alle sechs Wochen kalibrieren und das Datum notieren !

Nur so sind exakte Messergebnisse garantiert.

Sie erhalten alle Verbrauchs- und Zubehörartikel von Specialmed !

Specialmed® GmbH

Roßberg 2, D-84164 Lengthal

Tel.: +49 8731 3264130, Fax: +49 8731 3264930

Mail: info@specialmed.de, Page: www.specialmed.de