



Kalibrieranleitung für: Hydrolyzer (mit Spiralkabel)

Um die richtige Funktion des Gerätes zu gewährleisten, sollte Ihr Hydrolyzer spätestens alle sechs Wochen kalibriert werden.

1. Vorbereiten des Kalibrier-Sets

Wir liefern Ihnen eine vormontierte Kalibrier-Ausrüstung, die aus einem Flowmeter, Anschlusschlauch, Adapter und T-Stück besteht (siehe Abbildung).

- Stellen Sie sicher, dass das **Ventil fest geschlossen** ist (durch Drehen der Rändelmutter)
- Halten Sie das Ventil in einer Hand und **drehen Sie die Gasflasche in das Ventil**. Sie werden eventuell ein Zischen hören - drehen Sie zügig weiter bis zum Anschlag!

2. Kalibrierung des Gerätes

- Schalten Sie den EC60 am Schalter (**F**) ein
- Justieren Sie wie gewohnt die LCD-Anzeige an der Schraube (**E**) auf Null
- Setzen Sie das T-Stück in den Sensor-Kopf (Siehe Abbildung).
- Öffnen Sie das Ventil soweit, daß die Kugel an der unteren Markierung des Flowmeters schwebt - der angezeigte Wasserstoffwert Wert steigt nun an.
- Nach ca. 90 Sekunden erscheint im Geräte-Display der tatsächlich gemessene Wert. Entspricht der angezeigte Wert nicht dem des Kalibriergases (200ppm) so ist an der Kalibrierschraube (**D**) 200 einzustellen

3. Nach der Kalibrierung

- Schließen Sie das Ventil
- Entfernen Sie das Ventil von der Gasflasche – nur so ist diese dicht und es kann kein Gas entweichen !

Anmerkungen:


- Sparen Sie Gas und schonen Sie Ihren Sensor. Bitte vermeiden Sie Gasmengen über 1 l/min.
- Die Prüfgasflasche steht unter Druck. Schützen Sie diese vor Erwärmung über 50°C und direkter Sonneneinstrahlung. Versuchen Sie nicht die Flasche zu öffnen und werfen diese nicht ins Feuer.

Bitte denken Sie daran, das Gerät alle sechs Wochen zu kalibrieren und das Datum zu notieren !

Nur so sind exakte Messergebnisse garantiert.

Für Rückfragen / Probleme und Bestellungen:

Specialmed® GmbH
Roßberg 2, D-84164 Lengthal
Tel.: +49 8731 3264130, Fax: +49 8731 3264930
Mail: info@specialmed.de, Page: www.specialmed.de

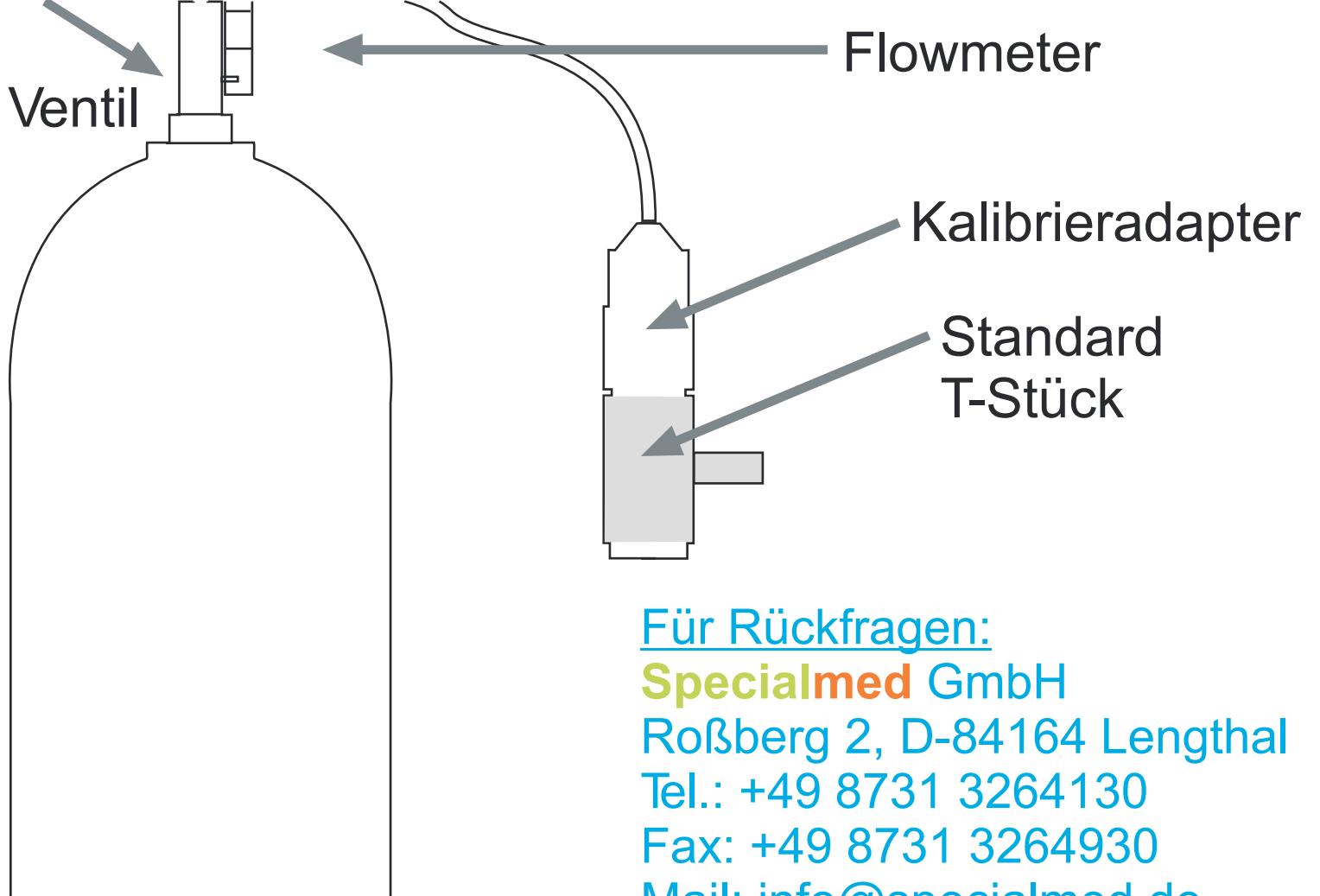

Für Rückfragen:

Specialmed GmbH

Roßberg 2, D-84164 Lengenthal

Tel.: +49 8731 3264130

Fax: +49 8731 3264930

Mail: info@specialmed.de

Page: www.specialmed.de

