


Kurzbedienungsanleitung

- Drücken Sie kurz den **Ein- / Ausschalter** und lassen Sie diesen wieder los.
- **Größe** in cm eingeben. *Alle Werte werden mit der Auf- / oder Abwärtstaste geändert und mit der Eingabetaste gespeichert.*
- **Alter** eingeben
- **Geschlecht** eingeben 0=männlich / 1=weiblich
- **Gewicht** in Kg eingeben
- Bitten Sie den Patienten nach Aufleuchten des Ausatemsymbols so fest und so viel wie möglich in das Einwegmundstück zu blasen. Dieser Vorgang muss mindestens eine Sekunde dauern.
- Nun wird der **FEV1** des Patienten angezeigt.
- Drücken Sie die Abwärtstaste um sich den **PEF-Wert** anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Abwärtstaste um sich den **FEV1%** Wert anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Abwärtstaste, um das Lungenalter anzuzeigen. Dieses ist niemals weniger als das eingestellte.
- Durch Drücken der Auf- / Abwärtstaste können Sie zwischen den Ergebnissen wechseln.
- Um den Test mit den gleichen Einstellungen zu wiederholen, blasen Sie einfach erneut in das Gerät.
- Um den Test mit geänderten Einstellungen durchzuführen, schalten Sie das Gerät aus und erneut ein.

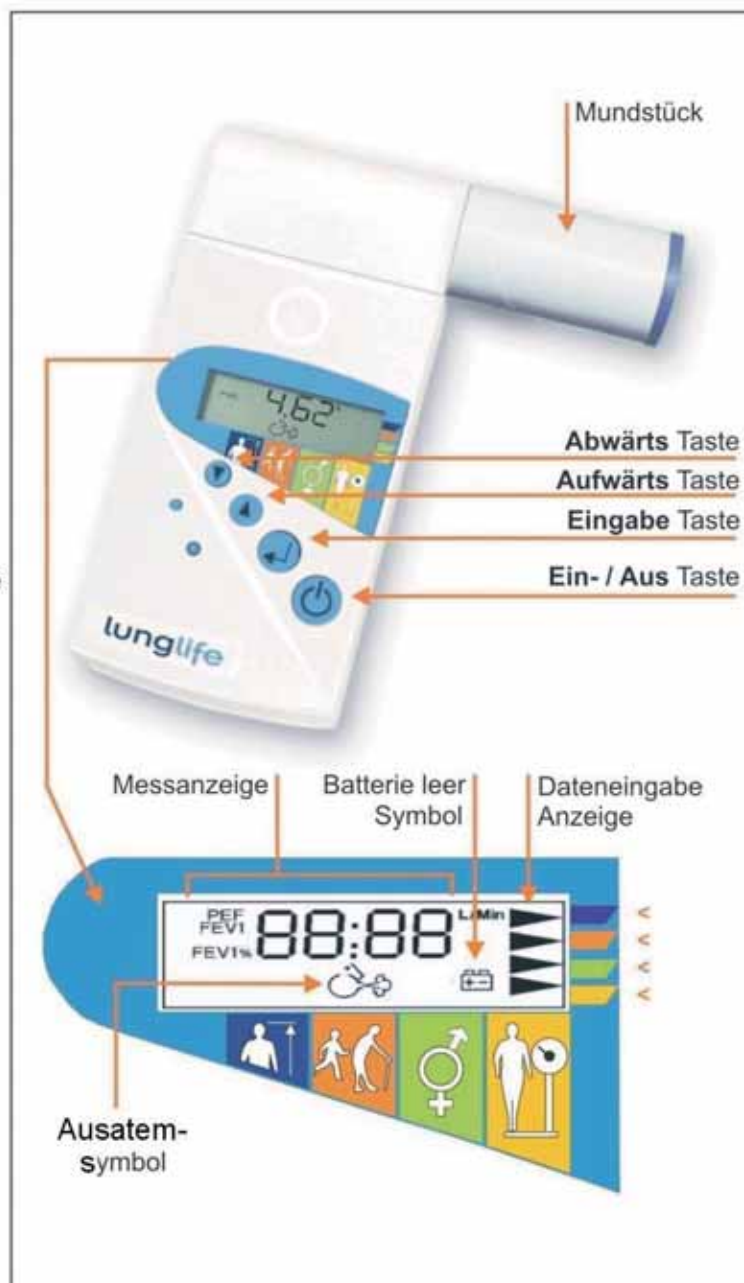

Vertrieb für Deutschland:

Specialmed GmbH, Roßberg 2, 84164 Lengthal

Tel.: +49 8731 3264130 Fax: +49 8731 3264930 E-Mail: info@specialmed.de Page: www.specialmed.de

Bedfont Scientific Ltd

105 Laker Road, Rochester Airport Industrial Estate, Rochester, Kent ME1 3QX England

Tel: +44 8700 844050 Fax: +44 8700 844051 E-mail: ask@bedfont.com

